


ABLAUFBESCHREIBUNG


Schritt 1: TESTUNG

1.

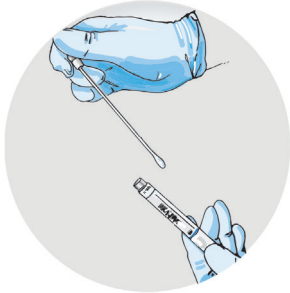

Sie führen den Test selbstständig (mit Ihrem Kind durch), indem Sie (bzw. Ihre Tochter/Ihr Sohn) 30 Sekunden auf dem Abstrichtupfer lutscht. Der Lolli-Abstrichtupfer (erkennbar an dem integrierten Röhrchen) wird nach dem Test fest verschlossen.

2.

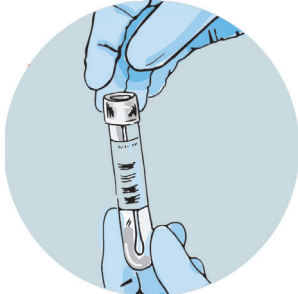

Das Röhrchen ist bereits mit einem Strichcode beklebt. Bitte schreiben Sie den Namen des Kindes auf das Namesfeld.



3.



Legen Sie das (integrierte) Röhrchen für die Einzeltestung in eine Plastiktüte.

Schritt 2: REGISTRIERUNG IHRER PATIENTENDATEN

4.



Bitte entnehmen Sie die „Anleitung zur REGISTRIERUNG der PCR-EINZELTESTUNG“ und erfassen die Patientendaten und die QR-Code-No. im LABUNIQU-Portal.

Dieser Barcode dient auch der Befundabfrage.

Schritt 3: PROBE IN DIE SCHULE BRINGEN

5.



Nach erfolgreicher Erfassung der Patientendaten in LABUNIQU muss die Probe **bis spätestens 08:45 Uhr** von Ihnen in die Schule gebracht werden. Bitte lassen Sie die Probe dem/der Corona-Beauftragte/n Ihrer Schule zukommen.